



Teamalex
Medical Technologies

FAUTEUIL EVASION e II

VHP à pousser



L'EVASION e II permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Usage intérieur exclusif.

Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression.

L'EVASION e II est un produit Français exclusif sur le marché, D.M. agréé par le CERAH.

caractéristiques :

hygiène	modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°
modules de couettes	remplacement aisé en cas d'usure
composition de la couette	garnie fibre creuse siliconée pour un allègement des points de pression
assise	composée de mousse HR 35 (Haute Résilience)
+ produit	Ultra maniable, dispose d'une large barre de poussée qui permet à l'aidant de manier le fauteuil avec facilité
positions	Inclinaison électrique à 30° : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés.
sécurité	Normes non-feu revêtement PVC/PU : M2 - 1021-1 - 1021-2 et biocompatible Normes non-feu revêtement Velours et Tissus chinés : 1021-1 - 1021-2 et biocompatible / Velours galène : 1021.1 uniquement
revêtements	velours déperlant, PVC/PU, tissus chinés
largeurs d'assise	38, 44, 50, 56 & 66 cm
hauteur sol / assise	48 cm
largeur hors tout	66 cm (T4), 67 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16)
options disponibles	câle-tête fabrication spéciale, appareil de soutien partiel de la tête, cale-tronc ajustable, harnais, kit batterie, assise Classe II, tablette ventrale
poids maximum utilisateur	130 kg
poids du fauteuil	38 kg
garanties	fauteuil 2 ans - vérin 5 ans
franco à l'unité	oui
fabrication	France - région grand Est- Aube





Teamalex
Medical Technologies

FAUTEUIL EVASION e II

dimensions en cm

largeurs d'assise	profondeurs d'assise	largeurs hors-tout	hauteur d'assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
380 mm 440 mm 600 mm 660 mm 660 mm	480 mm	670 mm 670 mm 730 mm 790 mm 880 mm	620 mm	1360 mm	38 kg	130 kg
tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg						

utilisation de la télécommande 2 boutons



Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.
Bouton BLANC : Avant
Bouton VERT : Arrière



double palette
repose-pieds rabattable



freins à tambour à
commande manuelle

aide à l'entretien

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers. Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

LES COLORIS



1 2 3
PVC / PU imperméable
non-feu M2
1- ébène
2- cacao
3- framboise



4 5 6
velours déperlant non-feu
EN 1021.1 & 1021.2
4 - choco édition
5 - black édition
6 - galène (1021.1 uniquement)



7 8
tissus chinés non-feu
EN 1021.1 & 1021.2
7 - gris chiné
8 - marron chiné

LES OPTIONS

câle-tête fabrication spéciale



appareil de soutien partiel de la tête



cale-tronc ajustable



harnais



assise Classe II



tablette ventrale



kit batterie



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



Teamalex Medical Technologies - Société à responsabilité limitée (SARL) -
Parc d'activités Les Moulins de la Lys, Rue Fleur de Lin - Lot n°12 - 59 116 Houplines -
Capital de 9 000€ - SIRET: 45052630600029 - NAF-APE: 4649Z - RCS/RM: LILLE - Numéro TVA: FR39450526306
Mail: Contact@teamalex-medical.fr - Tél: 03.66.72.15.78



N°1 du matériel médical