

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette lampe d'examen qui a fait l'objet de tous nos soins lors de sa fabrication et lors du contrôle qualité. Ce produit vous donnera entièrement satisfaction pendant de longues années. Avant de l'utiliser, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

Conformités réglementaires :

Marquage CE suivant les dispositions de la directive 93/42 CEE et les normes suivantes : EN 60598-2-1/A11, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4, EN 60598-2-25, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-41, EN 50581-2-41 (ROHS2)

L'emballage contient les pièces suivantes :

1. Lampe d'examen équipée de la technologie LED
2. Vis de fixation (x 4)
3. Notice d'utilisation

Utilisation :

Cette lampe a été spécialement conçue pour un éclairage intérieur, à utiliser avec nos différentes fixations.

Recommandations :

Avant l'installation ou toute intervention sur la lampe d'examen, débranchez toujours la fiche de la prise de courant. N'utilisez pas la lampe dans une atmosphère humide. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

Instructions de maintenance et de nettoyage :

Le montage et le branchement de la lampe d'examen doivent être effectués par des personnes qualifiées. Pour toute opération de maintenance, assurez-vous que le produit est hors tension. Tous les produits de nettoyage (désinfectant, détergeant, ...) peuvent être utilisés. En cas de tâche rebelle et incrustée, n'hésitez pas à utiliser un nettoyeur à base de poudre abrasive.

Instruction de montage :

1. Déclipsez le capot cache-vis de la base de la lampe
2. Vissez la lampe sur la fixation (par le haut)
3. Remplacez le capot



Le bras flexible est constitué d'un ressort : afin de préserver sa longévité, veillez à ne pas lui imposer un rayon de courbure trop faible !



Si le câble extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin de prévenir tout risque.

www.reculum.com

